


ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

Straumann TLX™ 4-mm-Implantate

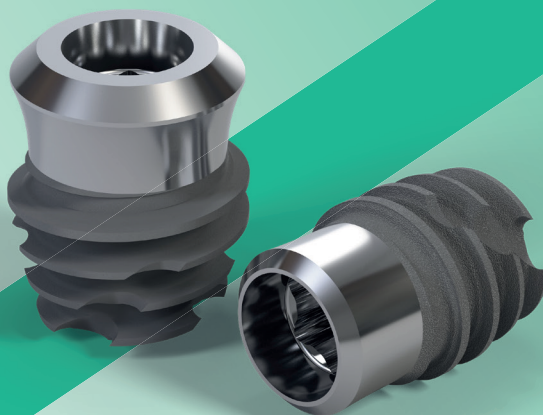

1. ПОКАЗАННЯ

Імпланти Straumann TLX™ SP 4 мм - це повністю конічні імпланти рівня м'яких тканин (Tissue Level), розроблені для клінічних випадків із вираженою атрофією щелепної кістки за умови достатньої якості кісткової тканини, що забезпечує досягнення первинної стабільності після встановлення імплантата, коли через обмежену вертикальну висоту кістки неможливо встановити імплантат більшої довжини.

Імпланти Straumann TLX™ SP 4 мм виготовлені з матеріалу Roxolid® із поверхнею SLActive® та доступні з максимальним зовнішнім діаметром Ø 4 мм, Ø 4,5 мм і Ø 5 мм та довжиною 4 мм.


Єдине кольорове кодування спрощує ідентифікацію інструментів та імплантів відповідно до доступних максимальних зовнішніх діаметрів.

Імпланти Straumann TLX™ SP 4 мм доступні з висотою шийки 1,8 мм (Standard Plus - SP).

Ортопедичні компоненти Straumann TLX™ ідентифікуються маркуванням NT (Narrow TorcFit™ / одна крапка) та RT (Regular TorcFit™ / дві крапки), що відповідають діаметрам платформи імплантата Ø 3,5 мм і Ø 4,8 мм відповідно.

	Straumann TLX™ SP 4 mm, Ø 4 mm	Straumann TLX™ SP 4 mm, Ø 4,5 mm	Straumann TLX™ SP 4 mm, Ø 4,5 mm	Straumann TLX™ SP 4 mm, Ø 5,0 mm
Висота шийки	Standard Plus - Шийка імплантата 1,8 mm			
Код кольору	 (сірий)	 (зелений)	 (зелений)	 (фіолетовий)
Протезна основа	NT (Narrow TorcFit™)		RT (Regular TorcFit™)	
З'єднання	TorcFit™			
Зображення				
Поверхня	SLActive®			
Матеріал	Roxolid®			
Доступні довжини	4 mm			

2. ДИЗАЙН ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

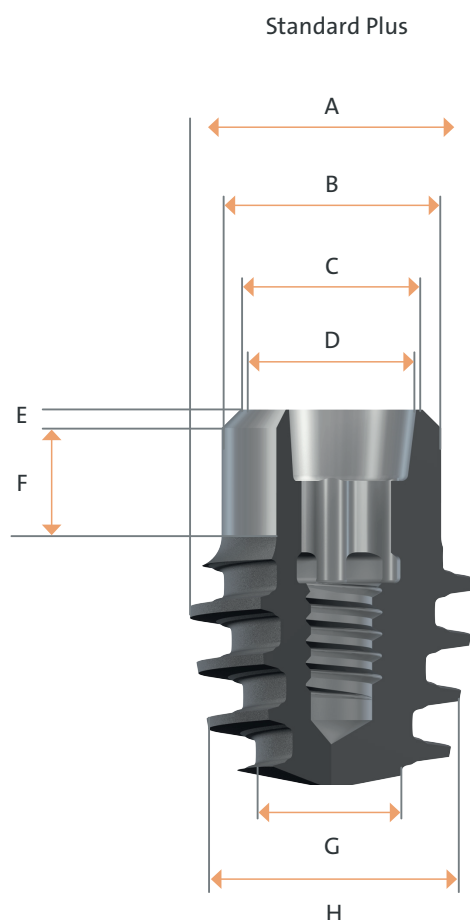

	Straumann TLX™ SP 4 mm, Ø 4 mm	Straumann TLX™ SP 4 mm, Ø 4,5 mm	Straumann TLX™ SP 4 mm, Ø 4,5 mm	Straumann TLX™ SP 4 mm, Ø 5,0 mm
(A) Максимальний зовнішній діаметр	Ø 4 mm	Ø 4,5 mm		Ø 5 mm
(B) Діаметр шийки імплантата	Ø 3,5 mm		Ø 4,8 mm	
(C) Діаметр платформи	Ø 2,9 mm		Ø 3,7 mm	
(D) Діаметр з'єднання	Ø 2,7 mm			
(E) 45° висота скосу	0,5 mm			
(F) Висота полірованої шийки Standart Plus	1,8 mm			
(G) Апікальний діаметр тіла	Ø 2 mm	Ø 2,2 mm	Ø 2,4 mm	Ø 3 mm
(H) Апікальний діаметр різьби	Ø 4 mm	Ø 4,2 mm	Ø 4 mm	Ø 4,7 mm
Кількість апікальних ріжучих граней	2			4
Довжина імплантата	4			
Крок різьби**	0,9 mm			

* Вказує на висоту шийки з гладкою поверхнею без покриття SLActive®

** Імплантат просувається на цю відстань з кожним оборотом

3. ПРОТОКОЛ РОБОТИ З ІМПЛАНТАТАМИ TLX SP 4 MM

Підготовка ложа імплантата на прикладі імплантів TLX SP 4 мм Ø 4 мм (NT), Ø 4,5 мм (NT) та Ø 5 мм (RT).

3.1 ПІДГОТОВКА ЛОЖА ІМПЛАНТАТА: ІМПЛАНТАТИ TLX™ SP 4 MM Ø 4 MM (NT)

Намітьте місце встановлення імплантата	Пілотне свердління Перевірте вісь імплантату		Визначте щільність кісткової тканини	Доопрацюйте ложе імплантату відповідно до щільності кісткової тканини				Встановлення імплантата
Голчасте свердло Ø 1,6 mm	Пілотне свердло Ø 2,2 mm	Пілотний пін Ø 2,2 mm		Свердло Ø 2,8 mm	Свердло Ø 3,2 mm	Свердло Ø 3,5 mm	Свердло Ø 3,7 mm	
800 U/min	800 U/min			800 U/min	800 U/min	800 U/min	800 U/min	15 U/min
026.0054	066.1301			066.1302	066.1303	066.1304	066.1305	

3.2 ПІДГОТОВКА ЛОЖА ІМПЛАНТАТА: ІМПЛАНТАТИ TLX™ SP 4 MM Ø 4,5 MM (NT/RT)

Намітьте місце встановлення імплантата	Пілотне свердління Перевірте вісь імплантату		Визначте щільність кісткової тканини	Доопрацюйте ложе імплантату відповідно до щільності кісткової тканини				Встановлення імплантата
Голчасте свердло Ø 1,6 mm	Пілотне свердло Ø 2,2 mm	Пілотний пін Ø 2,2 mm		Свердло Ø 2,8 mm	Свердло Ø 3,2 mm	Свердло Ø 3,7 mm	Свердло Ø 4,2 mm	
800 U/min	800 U/min			800 U/min	800 U/min	800 U/min	800 U/min	15 U/min
026.0054	066.1301			066.1302	066.1303	066.1305	066.1306	

3.3 ПІДГОТОВКА ЛОЖА ІМПЛАНТАТА: ІМПЛАНТАТИ TLX™ SP 4 MM Ø 5 MM (RT)

Намітьте місце встановлення імплантата	Пілотне свердління Перевірте вісь імплантата		Визначте щільність кісткової тканини	Доопрацюйте ложе імплантата відповідно до щільності кісткової тканини			Встановлення імплантата
Голчасте свердло Ø 1,6 mm	Пілотне свердло Ø 2,2 mm	Пілотний пін Ø 2,2 mm		Свердло Ø 3,2 mm	Свердло Ø 4,2 mm	Свердло Ø 4,7 mm	
			М'яка	→	→	→	TLX SP Implantat Ø 5,0 mm, RT, 4 mm, Roxolid®
			Середня	→	→	→	
			Тверда	→	→	→	
800 U/min	800 U/min			800 U/min	800 U/min	800 U/min	15 U/min
026.0054	066.1301			066.1303	066.1306	066.1307	

Попередження: Через конструктивні особливості та функціональне призначення свердел їх верхівка є до 0,5 мм довшою, ніж глибина встановлення імплантата. Наприклад, якщо препарування виконано до позначки 4 мм, фактична глибина ложа імплантата становитиме 4,5 мм.

Субкрестальне встановлення імплантата: під час визначення глибини препарування враховуйте кінцеве положення імплантата та не зменшуйте довжину препарування під час роботи пілотним свердлом.

Особливості препарування ложа у щільній кістковій тканині в загоєних ділянках. Застосування протоколу препарування для щільної кісткової тканини під час встановлення імплантатів TLX з ширшою різьбою (Ø 4,5 мм та Ø 5 мм) у загоєних ділянках може призвести до утворення невеликого проміжку між шийкою імплантата та кісткою альвеолярного гребеня.

У такому разі рекомендується заповнити цей проміжок невеликою кількістю аутогенної кістки. Для цього можна зібрати невелику кількість кісткової тканини за допомогою хірургічного долота з ділянки навколо остеотомії та розмістити її між імплантатом і стінками остеотомії.

3.4 ДОПОМІЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Якщо необхідно уникнути будь-якого зусилля під час від'єднання, використовуйте фіксатор Loxim®. Встановіть фіксатор на платформу імплантата та утримуйте його на місці під час від'єднання імплантовода.



Утримувач N для Loxim® (для NNC, NC та NT), 026.2558



Утримувач R/W для Loxim® (для RC, RN, WN та RT), 026.4558

4. ПЕРЕЛІК АРТИКУЛІВ

Арт	Зображення	Назва артикула	Розмір	Матеріал
035.3204S		Straumann TLX™ SP Implantat	Ø 4,0 mm NT SLActive® 4 mm	Roxolid®
035.3404S			Ø 4,5 mm NT SLActive® 4 mm	
035.3504S			Ø 4,5 mm RT SLActive® 4 mm	
035.3804S			Ø 5,0 mm RT SLActive® 4 mm	

5. ПРИМІТКИ

[illegible]

International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2026. Alle Rechte vorbehalten.
Straumann® und/oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

